



▶ テーナからの耳よりな情報


季節による温度の変化は
排泄にも影響を及ぼします

同じ製品をご利用されているのに
漏れが発生した
サイズが小さくなっているかもしれない
等々日頃のちょっとした疑問も
直ぐに解決すれば気分も晴れやかに！
営業時間内10:00-16:30ならば
フリーダイヤルガイダンス4番まで、
オンラインショップのからのお問合せは🍁
ここをクリック



例えば
夜間の尿量が増える原因は
ホルモンの影響がある事と
言われています。

テナの製品はアイテム
によってはサイズ感に違いが
あります
初めての方や、
特殊事情のある方などは
フリーダイヤルまで是非一度
お電話を！

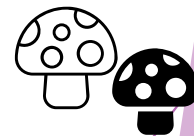

TENA宅配サービス（製品のご相談・ご注文のお申込み）



0120-107-586 フリーダイヤルガイダンス4番へお電話下さい。

® 月～金（土日祝日除く）

受付時間10:00～16:30

お体にあったサイズをお選び頂けて いますか？

大きいサイズを当てていると、こんなことが起こります。



ベルトの端と
パッドのマジック
テープが重なっ
ていると剥がれやす
くなります

パッドがもたつ
いて隙間ができ
やすく、
漏れやすくなり
ます

このようなパッドの
もたつきが
肌トラブルの原因と
なる
可能性もあります



Lサイズ
大きすぎ

Mサイズ
大きすぎ

Sサイズ
ぴったり！

同じ人に、フレックスのSサイズ、Mサイズ、
Lサイズを当てています。

この方には、一番右のSサイズがぴったり
のサイズとなります。

TENA宅配サービス（製品のご相談・ご注文のお申込み）



0120-107-586

月～金（土日祝日除く）

受付時間10:00~16:30



TENAフレックス 当て方のコツ ～腰骨の位置でベルトをとめる～

人によって骨盤の位置は異なります

サイズ感到迷いを感じたら、下記フリーダイヤルまでお問合せ下さい

他社製品ではMサイズを利用してたのでMサイズで良いでしょうか？

骨盤の位置の確認

腰骨ライン

腰骨に対してベルトの位置が高すぎます。この位置でないと鼠蹊部に隙間ができる場合、サイズが大きすぎる可能性が高いです。サイズが大きいとその分、コストも嵩んでいることになります。

袋購入時一枚単価比較

マキシL:¥195 マキシM:¥181 マキシS:¥174



腰骨の上に引っ掛けるような位置が、もっとも快適にお過ごし頂けるベルトの位置となります。ベルトが腰骨のでっぱりにかかるため、ずり落ちにくくなります。



腰骨の真上にかぶさってしまっているため、ベルトの位置が低すぎます。この位置でないとパッドが閉まらない場合、サイズが小さすぎる可能性があります。また、ひとつ上の写真のように腰骨のでっぱりには引っ掛けることができないため、パッドがずり落ちやすくなります。



TENA宅配サービス（製品のご相談・ご注文のお申込み）



0120-107-586

月～金（土日祝日除く）10:00～16:30

